

Anwendungshinweise zur Vakuumtherapie bei Gesichtsbehandlungen

Nachdem Sie das Gesicht sorgsam eingeölt haben, schalten Sie das Gerät ein. Dann setzen Sie den Schröpfkopf auf die Hautpartie und stellen mittels des Profi-Druckregulierers einen geringen Unterdruck ein (so stark, dass Sie ruckelfrei über die eingeölte Haut gleiten können, der Formgriff aber dennoch gut angesaugt bleibt).



Durch langsame Auf- und Abwärtsbewegungen an den Wangen und von der Stirnmitte aus nach links und rechts ziehende Bewegungen, erzielen Sie schon nach wenigen Minuten hervorragende Ergebnisse. Die Anwendungsdauer kann bei ca. 15 bis 20 Minuten liegen. Tägliche Anwendungen sind möglich.



Die empfohlenen Anwendungshinweise sind lediglich unverbindliche Empfehlungen. Sie können von jedem Anwender unterschiedlich empfunden und angewendet werden.